

ARJIN
Medical Products



کیسه ضد درد آرژین (کمپرس گرم)

شرکت آرام طب اروند



موارد مصرف:

تسکین دردهای اسکلتی عضلانی

راهنمای استفاده:

کیسه ضد درد آرژین را درون مایکروویو قرار دهید و دکمه **Start** (شروع) را فشار دهید و ۲ - ۳ دقیقه به آن زمان دهید بعد آن را بیرون آورده و روی موضع درد، حداکثر به مدت ۲۰ دقیقه بگذارید.

Made in IRAN

www.arjinmd.com

Email: info@arjinmd.com



HOT & COLD



Anti bacterial

ارتباط با مشتری

۰۲۱-۲۸۴۲۸۱۱۵

۰۹۹۰ ۷۹۳ ۵۵۰۶



آدرس: خوزستان، خرمشهر، بلوار علی ابن ابیطالب
دانشگاه علوم و فنون دریایی، واحد مرکز رشد

کاربرد: ضد اسپاسم ، تسکین دردهای اسکلتی عضلانی

(ویژه کلربان خانگی ، فیزیوتراپی ها ، بیمارستان ها ، مراکز کابیراکتیک و مراکز ماساژ و زیبایی)

هشدارها:

از قراردادن کیسه آرژین در **toaster (تستر) ، Streamer (بخاريز) ، Oven (اجاق)** خودداری کنید فقط آن را در مایکروویو گرم نمایید.

برای استفاده به عنوان پد سرد آنرا خشک و بدون رطوبت در سردخانه یخچال یا فریزر به مدت یک ساعت قرار دهید.

در مواقعی که به کیسه آرژین احتیاجی ندارید می توانید آن را درون یک کیسه پلاستیکی قرارداده و در فریزر نگهداری کنید تا در مواقع جراحی های ناگهانی بتوانید از آن به عنوان کمپرسور سرد فوری استفاده کنید .

⚠ **هشدار:** با توجه به متفاوت بودن قدرت مایکروویوها، حداکثر هر ۳۰ ثانیه تا رسیدن به دمای مطلوب حرارت کیسه ضد درد آرژین را در مایکروویو چک کنید.

⚠ **هشدار:** بیشتر از سه دقیقه کیسه ضد درد آرژین را درون مایکروویو گرما ندهید .

کمپرس گرم یا سرد را بیشتر از ۲۰ دقیقه روی بدن و موضع درد قرار ندهید .

برای گرم کردن مجدد کیسه آرژین بگذارید تا کیسه کاملا سرد شود و بعد دوباره آن را گرم نمایید.

استفاده از کیسه ضد درد آرژین برای زنان باردار در نواحی شکم و کمر ممنوع می باشد و ممکن است منجر به تحریک انقباضات رحمی شود. اما در زایمان به تسریع زایمان کمک می کند.

استفاده از حالت گرم کیسه ضد درد آرژین بر روی کبد و تیروئید نباید بیشتر از ۱۰ دقیقه باشد .

حالت گرم کیسه ضد درد آرژین در دردهای مزمن و التیام دردهای اسکلتی و عضلانی و التیام اسپاسم های مایچه ای کاربرد دارد و حالت سرد آن در روزهای اول یک جراحی مفید است. در جراحی و ضربه های ناگهانی و یا التهاباتی که زمان زیادی از آن سپری نشده است مانند التهاب عضو دردناک بعد از عمل جراحی و یا محل واکسن در نوزادان ، با استفاده از کمپرس سرد از خونریزی و التهاب بیشتر جلوگیری شود و تا زمانی که التهاب باقی است از پد سرد برای کاهش التهاب استفاده شود.

موارد استفاده تکمیلی :

کیسه ضد درد آرژین با اعمال گرما و افزایش گردش خون برای درمان تکمیلی خیلی از بیماریها از جمله درد و اسپاسم در ناحیه کمر، گردن ، مفاصل زانو، شانه ، لگن دست و پا سیاتیک ، دیسک کمر، دیسک گردن ، اسپاسم های ناشی از فلج مغزی ، بیماری های روده ای ، دل پیچه های میهم ، کولیک های کلیوی و نفخ شکمی یبوست ، اسهال ، سندروم روده تحریک پذیر احتقان پستان مادران شیرده دردهای کلیوی ، احتباس ادراری ، بی اختیاری ادراری ، کیست های تخمدان و پستان دردهای قاعده گی ، کرمپ های شکمی ، دردهای زایمان ، دیسمنوره ، بعضی از ناباروری ها ، درد های ناشی از شکستگی استخوان ، آتروفی عضلات ، فلج بلز ، دندان درد ، گوش درد ، پف چشم ، انسداد عروقی ، علائم نوروپاتی در بیماران دیابتیک ، ضعف ها و نارسای های ریوی ، کرونا ، آنفولانزا ، سرماخوردگی ، تنگی نفس ، آسم آلرژی ، گرفتگی سینوس ها ، سردرد و سینوزیت ، ندول های تیروئیدی ، کم کاری و پرکاری تیروئید ، دیسفونی ، آفونی ، بیماری های اعصاب گلو و حنجره و... با تجویز پزشک معالج استفاده گردد.

راهنمای استفاده در ماساژ : استفاده از کیسه ضد درد آرژین به همراه روغن مالی و ماساژ می تواند در کاهش دردهای عضلانی مفید و موثر باشد .

با اسپری کردن کمی آب و یا رایحه مورد دلخواهتان روی کیسه ضد درد آرژین می توانید آن را به شکل مرطوب و معطر استفاده نمایید. 

آرژین گرمای زندگی

صدای مشتری : ۰۲۱ - ۲۸ ۴۲ ۸۱ ۱۵

برای دیدن ویدیوهای مربوط به سایت arjinmd.com مراجعه کنید.



2 13 21 95 97 36 80 00 1



این محصول دارای گواهی ثبت اختراع به شماره ۱۰۱۶۶۲ می باشد و کلیه حقوق مادی و معنوی آن متعلق به شرکت آرام طب اروند است و هر گونه کپی برداری از محصول پیگرد قانونی دارد.